

## Felhasználási kézikönyv

Kérjük, hogy a termék első használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót, illetve gondosan őrizze meg a későbbi felhasználás céljából!

Fontos! A nem megfelelő használat a kezelőágy sérüléséhez vezethet!

**Termék neve:**

**Kezelőágy (sebészeti ágy)**

**elektromos magasságállítással, 2-részes fekvőfelülettel (felsőrésszel)**

Gyártó: AVA-FA Kft

Típus: 6P-2R-EL-PF



**Termék alkotórészei:**

- fejrész
- fekvőrész
- talp
- emelőszerkezet
- aktuátor+trafó+kézivezérlő

**Anyagösszetétel:**

- fém zárt profilok
- lemez
- natúr forgácslap
- 50 mm-es szivacs
- műbőr



FORGALMAZÓ: AVA-MED HUNGARY KFT  
WWW.AVAMED.HU

GYÁRTÓ: AVA-FA KFT H 9025 GYŐR, IKRÉNYI U. 11.



**Felület-kezelés:** acélváz elektrosztatikus porszórással

**Kárpitozás:**

- varratmentes műbőr-borítás
- 50 mm-es nagy teherbírású szivacs
- fejtámlán arckivágással és dugóval

**Termék adatai:**

- súly: **50 kg**
- terhelhetőség: **200 kg**
- kárpit alapméret: **190x65 cm** (igény szerint változtatható)
- fekvőfelülete rögzített
- magassága elektromosan állítható: **45-100 cm**
- fejrész fokozatmentesen mechanikusan vagy elektromosan állítható: **-15- +60°-ig**
- alap felszereltség fix láb, de igény szerint rendelhető egyéni fékes vagy központi fékes vagy behúzható görgős kivitelben is
- görgők (kerekek) átmérője igény szerint meghatározható
- az ágy két végén papírlapedő-tartóval ellátott

**Elektromos ellátása:** 230/240 V AC 50/60Hz IP4X

**Csomagolás:**szállítás összeszerelt állapotban, kartonpapír él-védőkkel illetve zsugorfóliával csomagolva

**Karbantartás és tisztítás:** Ajánlott a termék rendszeres időközönkénti átvizsgálása. Karbantartást illetve javítást csak szakember végezhet! Karbantartás/javítás előtt mindig válassza le a kezelőágyat az elektromos hálózatról! A tisztítás enyhén lúgos, fertőtlenítő hatású tisztítószerrel illetve a felhasználási hely fertőtlenítési szabályainak megfelelően



FORGALMAZÓ: AVA-MED HUNGARY KFT  
WWW.AVAMED.HU



GYÁRTÓ: AVA-FA KFT H 9025 GYŐR, IKRÉNYI U. 11.

### **Gyártói nyilatkozat:**

Az AVA-FA Kft., mint a Kezelőágy (sebészeti ágy) gyártója nyilatkozik arról, hogy a termék tervezésekor, kialakításakor minden biztonsági és egészségügyi előírást figyelembe vett, illetve a termék gyártása során bevizsgált, szabványnak megfelelő és kiváló minőségű alapanyagok kerültek beépítésre.

**Osztály:** I.


**Garanciaidő:** fém váz esetében 3 év, elektronika esetében 1+1 év

## **HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**

### **Figyelmeztetések!**

Üzembe helyezéskor ellenőrizze, hogy a kezelőágy kompatibilis az Ön által használt hálózati feszültséggel, és figyeljen arra, hogy soha ne feszítse meg túlzott mértékben az elektromos kábelt. Használat közben ellenőrizze, hogy a vezeték ne akadályozza a mozgó alkatrészek működését!

A kezelőágy egyik végét se terhelje túl, mert az balesethez vezethet!

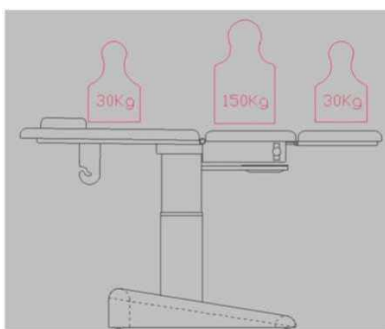

**Figyelem!** Működtetés közben a hálózati csatlakozó kihúzása megszakítja az ágy működését!

Amennyiben nem használja a kezelőágyat, a hálózati csatlakozót húzza ki!



FORGALMAZÓ: AVA-MED HUNGARY KFT  
WWW.AVAMED.HU



GYÁRTÓ: AVA-FA KFT H 9025 GYŐR, IKRÉNYI U. 11.

### Használat

A kezelőág magassága az elektromos vezérlő segítségével állítható.

### Hibaelhárítás

Hiba-jelenség	Lehetséges ok	Hiba elhárítása
az ágy nem emelkedik/süllyed	áramellátási probléma	ellenőrizze a csatlakozót
	akadály	ellenőrizze, hogy nincs-e mozgatót akadályozó tárgy
		állítsa vízszintbe
a kézi elektromos vezérlő nem működik	nincs csatlakoztatva	ellenőrizze a csatlakozást