
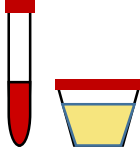


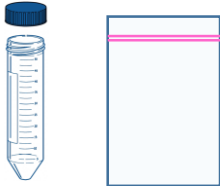


*A csomagolás megkezdése előtt ellenőrizze, hogy minden rendelkezésre áll-e!*


- 


1 beküldendő minta (elsődleges tartály)
- 


2 szivárgásmentes másodlagos tartály (pl. 50 ml-es centrifugacső, vagy zárható műanyag tasak),
- 


3 a minta kitöltött kísérőiratai, külön, zárható műanyag tasakba csomagolva
- 

4 papírvatta nedvszívó anyag (pl. papírvatta)
- 

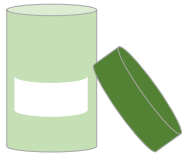5 gumikesztyű
- 

6 harmadlagos tartály: merev falú, zárható, szivárgásmentes és címke a feliratozáshoz
- 

7 hőszigetelt (pl. hungarocell bélésű) kartondoboz, vagy hungarocell doboz vagy hűtőtáska
- 


8 jégakku vagy szárazjég
- 

9 veszélyes hulladék tároló, fertőtlenítőszer




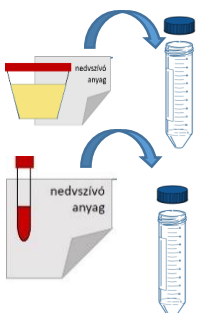
## Útmutató veszélyes fertőző anyagok („A” kategória) három rétegű – IATA P620- csomagolásához (2/2):

① Készüljön elő a csomagoláshoz:

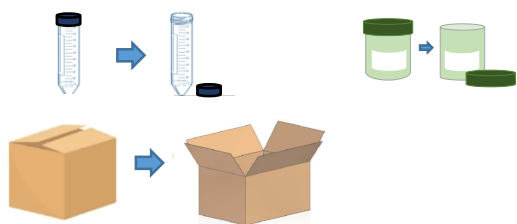


Nyissa ki a szállításhoz használni kívánt tartályokat: a másodlagos tartályt és a merev falú, zárható, harmadlagos konténert valamint a hűtőtáskát vagy hőszigetelt kartondobozt! Szükség esetén készítse elő a hűtőanyagot (jégakku, szárazjég) is!


②  Húzza fel a gumikesztyűt! *A csomagolási lépések között (tartályok külső felülete) és a végén (munkafelület) fertőtlenítsen!*

- ③ 
- Feliratozza a mintát (beteg neve, mintatípus, mintavételi időpont). Ez az elsődleges tartály.
  - Nedvszívó anyaggal (pl. papírvatta) tekerje körbe a mintát tartalmazó edényt,
  - majd tegye az nedvszívó anyaggal körbetekert mintát az másodlagos tartályba (50 ml-s centrifuga cső vagy szivárgásmentesen zárható zacskó). **Ha a mintatároló edényt nem állvánnyal együtt helyezi másodlagos tartályba, akkor bélelje ki a konténert (pl. papírvattával), úgy, hogy a minta stabilan, függőleges helyzetben helyezkedjen el benne!**
  - A másodlagos konténert zárja le és fertőtlenítsen le kívülről.

④ Ezt követően vegye le a gumikesztyűt (és kezelje veszélyes hulladékként)!

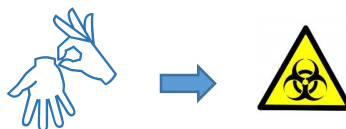

⑤ A másodlagos tartályt helyezze bele a harmadlagos tartályba és zárja le, feliratozza a tartalmát!

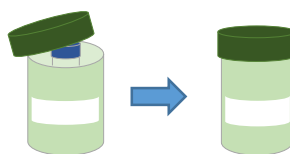

⑥ A mintát tartalmazó (harmadlagos) tartályt és a mintakísérő iratokat *(külön csomagolva, műanyag tasakba helyezve)* tegye a hűtőtáskába vagy hőszigetelt kartondobozba.


Hűtve történő szállításhoz tegyen elegendő mennyiségű jégakkut vagy szárazjeget a konténer köré.

A szállítódobozra feliratozza a küldő nevét és telefonszámát, a fogadó nevét és telefonszámát, a veszélyes kórokozó veszély jelet.



⑦ Zárja le a kartondobozt/hűtőtáskát és az eljárás szerint feliratozza (név, telefonszám)!



⑧  Értesítse a laboratóriumot a minta indításának és várható érkezésének időpontjáról!